

## Obsah testovacího balíčku

Tampónek, testovací kazeta, zkumavka, bombička s tekutinou

---

### Postup testu

1. Vyjmout testovací kazetu z obalu, vyndat tampónek z obalu a odložit ji na přiložený ubrousek
2. Otevřít zkumavku, OPATRNE otevřít bombičku s tekutinou /NEMAČKAT/ a veškerou tekutinu z bombičky přelít do zkumavky. Zkumavku držet vzpřímeně /svisle/.
3. Volnou rukou provést stěr z nosu /několikrát setřít vnitřní nosní stěnu v každé dírci/ a tampónek se vzorkem vložit do zkumavky. Cca 10 x opatrně zatlačit na stěnu zkumavky, aby se vzorek co možná nejvíce uvolnil do tekutiny a cca 1 min nechat „louhovat“.
4. Vyjmout tampónek ze zkumavky, „vymačkat“ do zkumavky a tu pevně uzavřete víčkem s odkapávačem.
5. Cca po 1 minutě nakapat na testovací kazetu do oválného otvoru 3 kapky tekutiny ze zkumavky a vyčkat, až se objeví barevný proužek /cca 15 min/

V případě negativního výsledku testu se veškeré součásti testovacího balíčku vyhodí do připraveného odpadkového koše.

V případě pozitivního výsledku se postupuje dle instrukcí vedení školy